

MASCARILLA DOBLE CAPA REUTILIZABLE

FABRICADO POR DISEÑO FLAMENCO S.L N.I.F B91735035

TEJIDO INTERIOR HOMOLOGADO POR AITEK. NORMA UNE 0065/2020

ESTA MASCARILLA CUMPLE CON LA NORMATIVA DEL MINISTERIO DE SANIDAD


ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN PRODUCTO SANITARIO EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 93/42 O DEL REGLAMENTO UE / 2017 / 745

INSTRUCCIONES DE USO:

- **Manipular SIEMPRE la mascarilla con las manos lavadas.**
- Evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y cualquier otra superficie u objeto.
- A partir de los 25 lavados pierde filtración.

Lavado y secado

1. Se debe realizar un ciclo completo de lavado con un detergente neutro, a una temperatura de **60 °C en lavadora**.
2. Realizar una inspección visual (con manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (deformación, desgaste...) se debe desechar la mascarilla.
3. Secar la mascarilla solo **al aire**, dentro de las 2 horas posteriores al lavado.

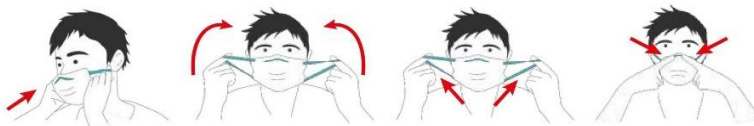

Colocación

1. Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica
2. Evitar contacto con el interior de la mascarilla. Sostener por las gomillas y colocarla a la altura de la boca y nariz.
3. Llevar las gomillas detrás de las orejas.
4. Ajustar la mascarilla de forma que cubra desde la nariz a la barbilla.
5. Nunca tocar la mascarilla sin lavado previo de manos.

Retirada

1. Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. (No retirar con guantes).
2. Retirar la mascarilla tirando de las gomillas, evite tocar el tejido.
3. Aísle la mascarilla hasta que realice su lavado.
4. Para desecharla, échela inmediatamente en un cubo cerrado.
5. A continuación, **volver a lavarse bien las manos**.